

ウォーレス・リング・ペッサリー 子宮下垂/子宮脱治療用リング




子宮脱治療用にデザインされた製品です。
膣を支えることで子宮が下垂するのを防ぎます。

ペッサリーを挿入することで、膀胱と腸への圧迫を軽減します。
また、子宮変位を矯正し、尿道を圧迫することが原因の
腹圧性尿失禁を軽減することもできます。

特徴

- ・常温で柔らかく、挿入しやすく患者さまへの痛みが緩和。
- ・材質に弾力性があり、さらにリングの肉厚により、子宮を支えます。
- ・豊富なサイズバリエーションで患者さまにあったサイズ選択が可能。
- ・材質はポリ塩化ビニル(可塑剤:フタル酸ジ-2-エチルヘキシル)。

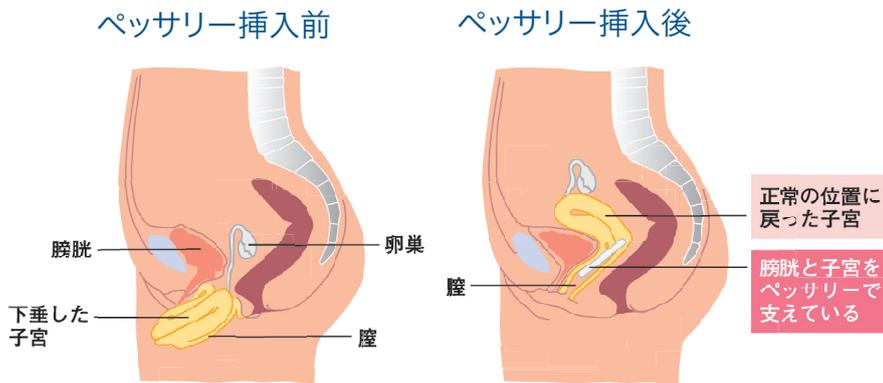

ご使用に際しての注意事項

- ・本製品は未滅菌で出荷されていますが、クリーンルームで製造されているので、パッケージから取り出して直ぐにそのままお使いいただけます。消毒や滅菌をする必要はありません。
- ・リング・ペッサリーをお湯(滅菌液)で暖めると、より柔軟性が増し、挿入し易くなります。
- ・使用するサイズは2本の指を膣内に挿入し、その指を広げて膣壁に接触させ、そのままの状態から抜いて測定します。測定したサイズと同等の外径のリング・ペッサリーを選択します。日本人の平均サイズは65-74 mmです。
- ・本製品は挿入後2～3ヶ月毎に取り出し、膣内の接触面を必ず観察してください。
- ・本製品は単回使用製品です。
- ・本製品をオートクレーブ(高圧蒸気)で滅菌しないでください。製品の変形や破損につながる可能性があります。オートクレーブやガス滅菌、プラズマ滅菌などをした際の製品の安全性は検証されていません。
- ・本製品に金属は含まれていません。本製品を装着したままMRI検査を受けても磁気誘引の危険は増加しません。

製品のパッケージ・仕様等は改良のため予告なく変更させていただく場合がございます。予めご了承ください。

ご使用の前に製品添付文書を必ずお読みください。

製造販売元
 オリジオ・ジャパン株式会社
 〒231-0021
 神奈川県横浜市中区日本大通11
 横浜情報文化センター4F
 【お問い合わせ電話番号】045-319-6826
 【注文用ファックス番号】045-319-6581
www.origio-japan.com

代理店名

品番	製品名/外径サイズ(mm)	包装単位
700/300/XXX (XXXはサイズの種類)	リング・ペッサリー (50 / 53 / 56 / 59 / 62 / 65 / 68 / 71 / 74 / 77 / 80 / 85 / 90 / 95 / 100 / 110)	1箱(2個入り)

*未滅菌、原材料：ポリ塩化ビニル

販売名：ウォーレス・リング・ペッサリー
 承認番号：22000BZX01121000

©2018 ORIGIO Japan Ltd. All Rights Reserved.



CooperSurgical Fertility Companies

お客様各位

本カタログに記載の品番製品は今後在庫がなくなり次第末尾に JP がついた品番に切り替わって参ります
いずれの品番のリングペッサリ—も同じ素材・形状です

カタログ記載品番		切り替わり品番	製品名	サイズ	製造メーカー
700/300/050	⇒	700/300/050JP	Wallace リングペッサリ—	50mm	クーパーサージカル
700/300/053		700/300/053JP	Wallace リングペッサリ—	53mm	クーパーサージカル
700/300/056		700/300/056JP	Wallace リングペッサリ—	56mm	クーパーサージカル
700/300/059		700/300/059JP	Wallace リングペッサリ—	59mm	クーパーサージカル
700/300/062		700/300/062JP	Wallace リングペッサリ—	62mm	クーパーサージカル
700/300/065		700/300/065JP	Wallace リングペッサリ—	65mm	クーパーサージカル
700/300/068		700/300/068JP	Wallace リングペッサリ—	68mm	クーパーサージカル
700/300/071		700/300/071JP	Wallace リングペッサリ—	71mm	クーパーサージカル
700/300/074		700/300/074JP	Wallace リングペッサリ—	74mm	クーパーサージカル
700/300/077		700/300/077JP	Wallace リングペッサリ—	77mm	クーパーサージカル
700/300/080		700/300/080JP	Wallace リングペッサリ—	80mm	クーパーサージカル
700/300/085		700/300/085JP	Wallace リングペッサリ—	85mm	クーパーサージカル
700/300/090		700/300/090JP	Wallace リングペッサリ—	90mm	クーパーサージカル
700/300/095		700/300/095JP	Wallace リングペッサリ—	95mm	クーパーサージカル
700/300/100		700/300/100JP	Wallace リングペッサリ—	100mm	クーパーサージカル
700/300/110		700/300/110JP	Wallace リングペッサリ—	110mm	クーパーサージカル