

Ультрачистый газовый фильтр. Инструкция по использованию.

Ультрачистый фильтр разработан для удаления контаминирующих частиц и газообразных соединений из газа, используемого в лабораториях.

Первое подключение

Если в настоящий момент Ваша газовая магистраль не снабжена коннекторами, пожалуйста, сделайте следующее:

- Выберите место прикрепления для фильтра с помощью кронштейна
- Перережьте газовую магистраль в выбранном месте
- Вставьте и затяните с помощью хомута входной фитинг (соединитель со шлангом) в газовый шланг, идущий от газового баллона
- Вставьте и затяните с помощью хомута выходной фитинг в газовый шланг, идущий к инкубатору

Установка фильтра

Для подключения ультрачистого фильтра к газовой магистрали, пристегните входной конец фильтра к фитингу шланга, идущей от газового баллона. Затем пристегните выходной конец фильтра к фитингу шланга, идущему к инкубатору. Затем вставьте фильтр в кронштейн.

Внимание: специальный дизайн фитингов подразумевает защиту от неправильной установки. Пожалуйста, производите установку согласно изображённой на этикетке фильтра стрелки, направленной в сторону инкубатора.

Обслуживание

Рекомендовано менять Ультрачистый газовый фильтр каждые 4-6 месяцев в зависимости от загрузки инкубаторов.

Ред. 14.10.2011