


Инструкция по замене «О»-кольца СТРИППЕРА-СС

Стриппер-СС

Замена «О»-кольца (см. рисунок ниже) Необходима деталь MXL3-ORK-CC

Для того чтобы заменить «О»-кольцо, открутите и удалите зажимное кольцо. У основания поршня из нержавеющей стали рядом с корпусом вы увидите «О»-кольца: два кольца чёрного цвета - одно с отверстием небольшого размера, второе – с более крупным отверстием - и находящееся между ними белое пластиковое кольцо-разделитель. Правильный порядок расположения колец очень важен – ближе всего к корпусу должно находиться чёрное кольцо с небольшим отверстием, далее следовать белый разделитель, а в последнюю очередь одевают чёрное кольцо с отверстием большого размера. **Белое кольцо-разделитель необходимо одевать так, чтобы углубление в его центре было обращено в сторону зажимного кольца. Сторона с углублением отмечена красой точкой.** Углубление выполняет функцию фиксации капилляра и обеспечивает прочность соединения. Привинтите зажимное кольцо и вставьте капилляр.

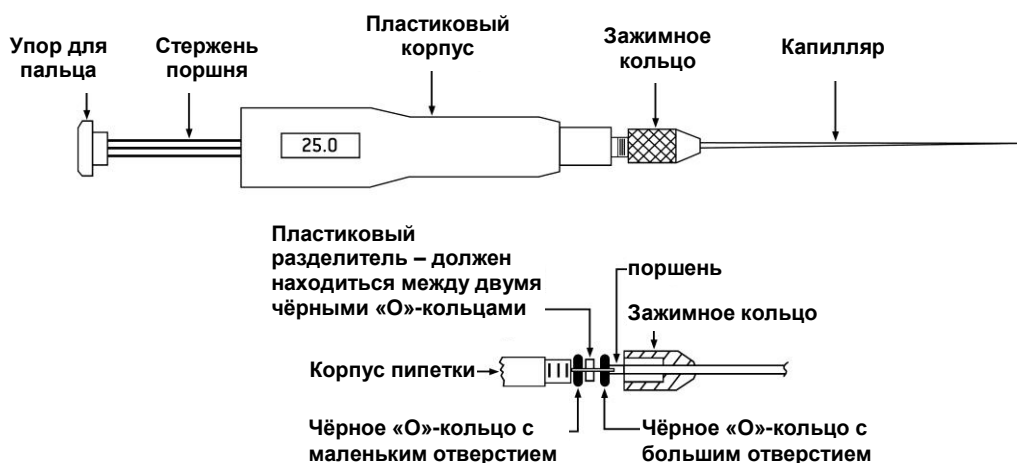

Производитель:

ORIGIO MidAtlantic Devices

77 Elbo Lane, Mount Laurel NJ 08054

Представительство в России:

ООО «ОРИДЖИО» 196158, Санкт-Петербург

Пулковское шоссе 40/4 литер А

(812) 318-02-90

Info-ru@origio.com

www.origio.com

Видео по замене «О»-кольца:

<http://origio.com/Download%20Center/Marketing%20Material/Videos/Stripper%20O%20ring.aspx>

Ред. 14.10.2011